


Kurzanleitung AB101 Dampfdurchdringungstest für poröse Güter und Hohlkörper

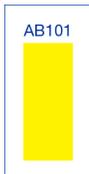

Ungebraucht



Der AB101-TST-Indikator schlägt von Gelb zu Blau/Violett um, wenn die Dampfdurchdringung schnell und gleichmäßig bei 134 °C - 137 °C und einer Haltezeit von max. 3,5 Minuten erfolgt.

Pass (Test bestanden) Pass/48hrs




Der AB101-TST-Indikator hat einen deutlichen Farbumschlag auf Blau/Violett erreicht. Nach einem Zeitraum von 24-48 Stunden kann sich die Blau-/Violettfärbung des Indikators verdunkeln.

Die Entlüftungsphase des Sterilisators funktioniert korrekt und die Dampfdurchdringung ist zügig und gleichmäßig erfolgt.

Ist die Dampfdurchdringung nicht zügig und gleichmäßig erfolgt, schlägt der Indikator nicht vollständig auf Blau/Violett um.

Siehe hierzu die Farbreferenz unten für Beispiele zu **Fail**-Ergebnissen.

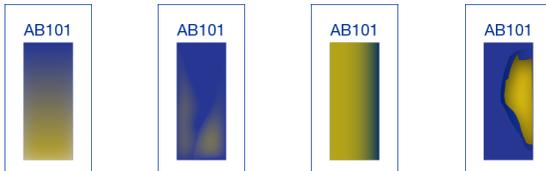

Abbildungen, Fotos und Beschreibungen dienen lediglich als allgemeine Anleitung und stellen keinen Bestandteil eines Vertrags oder einer Bestellung dar, sofern dies nicht schriftlich vereinbart wurde.

Die Farben werden in den Darstellungen nur so genau wiedergegeben, wie es die Drucktechnik zulässt.



BROWNE

Sterility Assurance Products
World Class and Globally Trusted