



Datenblatt
Class5 Steam Integrator

Fassung vom Dezember
2017
Seite 1 von 2

	Medi Pack Class5 Steam Integrator (EN ISO 11140-1) Sterilisationsprodukt für die Chargenkontrolle der Dampfsterilisation
PRODUKTBEZEICHNUNG:	Chemischer Indikator für die Messung der drei kritischen Parameter (Zeit, Temperatur und Sattedampf) bei der Dampfsterilisation von medizinischen Instrumenten im medizinischen, dentalen oder veterinären Gebrauch.
PRODUKTBESCHREIBUNG:	Typ 5 Integrator System erfüllt AAMI DIN ISO 11140-1, Type 5 Material: 250 g Ivory Karton, Front laminiert Text und Logo: grün und schwarz Indikator 1: von blau zu schwarz, Typ 1 Indikator 2: von pink zu schwarz, Typ 2 Indikator 3: von grün zu schwarz, Typ 2 Artikel-Nr.: 600405
LAGERUNG:	Weder Licht noch Hitze aussetzen. Lagerung in verschlossenen Packungen bei Raumtemperatur (15° C bis 40° C). Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht in unmittelbarer Nähe von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln lagern.
INFORMATION:	Der Gebrauch von chemischen Indikatoren ist zum Monitoring bei verpacktem Sterilgut, Trays, Containern und Sterilisationsbeuteln wichtig. Chemische Indikatoren sollten innerhalb jeder Art von Verpackung benutzt werden, um sicherzustellen, dass in allen Verpackungen die gleichen Bedingungen beim Sterilisationsprozess vorhanden waren. Die Ladung im Autoklaven wird nur dann entnommen, wenn die Indikatorenanzeiger 1 und 2 schwarz umgeschlagen sind. Ist dies nicht der Fall, muss die Ladung im Autoklaven erneut sterilisiert werden.

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Lieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.



Datenblatt
Class5 Steam Integrator

Fassung vom Dezember
2017
Seite 2 von 2

INFORMATION:

Der stabile Indikatorstreifen lässt ein Anheften in der Dokumentation zu. Der Class 5 Steam Integrator behält seine Wirkung bei nicht geöffneter Packung 5 Jahre nach Herstellungsdatum, wenn die Packung nach den Empfehlungen gelagert wird.

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Lieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.



Datenblatt
Class5 Steam Integrator

Fassung vom Dezember
2017
Seite **3** von **2**

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Lieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.