



**Datenblatt  
Bowie & Dick Test  
Einmaltest**

Fassung Januar 2015  
Seite 1 von 1

	<b>MP Bowie &amp; Dick Test</b>
<b>PRODUKTBEZEICHNUNG:</b>	Europäische Version Einmal-Testpaket Simuliert das 7kg Wäschepaket gemäß DIN EN ISO 11140-4
<b>PRODUKTBESCHREIBUNG:</b>	Der Bowie-Dick-Test ist ein Funktionstest (sog. Typ-test, kein Sterilitätstest) und dient zur täglichen Überprüfung von Dampf-Sterilisatoren in Bezug auf Luftentfernung und Dampfdurchdringung. Der Funktionstest erfolgt in der leeren Kammer. Der Einmaltest ist die schnellste und einfachste Art, die Funktionsfähigkeit des Autoklaven zu prüfen. Der Test ist schwermetallfrei und handhabungssicher. Eindeutiger, nicht umkehrbarer Farbumschlag von blau nach pink, sichtbar auf dem Indikatorblatt. Sie haben absolute Dokumentationsicherheit!
<b>LAGERUNG:</b>	Weder Licht noch Hitze aussetzen. 10° C bis 40° C relative Feuchtigkeit < 60% aufbewahren
<b>INFORMATION:</b>	Die Testdurchführung erfolgt bei 134°C und einer Haltezeit von 3,5 Minuten, oder bei 121° C und 15 Minuten Haltezeit. Das Testpaket soll nach EN 285 auf das untere Gitter hinter der Tür des vorgeheizten Autoklaven eingelegt werden. Sollte der Indikatorbogen nicht einheitlich umschlagen, ist dieses sofort zu dokumentieren. Wenn auch ein Wiederholungstest Unregelmäßigkeiten auf dem Indikatorbogen zeigt, ist der Autoklav sofort stillzulegen, da dann eine technische Überprüfung notwendig ist. Vermeidung des Doppelgebrauchs durch Farbumschlag auf der Box von pink nach schwarz!

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Lieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.