



Produktdatenblatt

2312 2315

Rev. 4
 Inkrafttreten: 30. 01.2014
 Seite 1 von 1
 Genehmigung: CO 3100
 Übersetzungsdatum: 01.05.2018

Produkt- beschreibung

Der Browne STF Load Check Indikator wurde mit großer Sorgfalt entwickelt, um der ISO 15883 zu entsprechen. Die Testspezifikationen sorgen für eine realistische und einheitliche Überprüfung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. Der Browne STF Load Check Indikator wurde zur Verwendung in jedem Zyklus entworfen. Hierzu wird der Indikator in den Halter eingebracht, anschließend in einen Korb mit Instrumenten gelegt und durchläuft dann einen normalen Zyklus. Der Browne STF Load Check Indikator ist mit einer hellroten Prüfanschmutzung bedruckt, die sicher in der Handhabung, leicht zu erkennen und daher auch einfach auszuwerten ist.



Spezifikation

Die Browne Prüfanschmutzung bietet die gleiche Leistung wie die in der ISO / TS 15883-5 beschriebene Edinburgh-Prüfanschmutzung.

Anwendbare Standards

ISO / TS 15883-5 Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für chirurgische Instrumente

Produkt- abmessungen

100mm x 50mm

Verpackung 2315

Primär- verpackung Inhalt:	100 Indikatoren	Abmessungen	110mm x 50mm x 40mm	Gewicht: 135g Brutto
----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-------------------------

Umverpackung Inhalt:	60 x 100 Indikatoren	Abmessungen	350mm x274mm x 158mm	Gewicht: 8,2 kg Brutto
-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	---------------------------

Verpackung 2312

Primär- verpackung Inhalt:	25 Indikatoren	Abmessungen	110mm x 50mm x 20mm	Gewicht: 39,59g Brutto
----------------------------------	-------------------	-------------	------------------------	---------------------------

Umverpackung Inhalt:	60 x 100 Indikatoren	Abmessungen	350mm x274mm x 158mm	Gewicht: 4,5 kg Brutto
-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	---------------------------

Empfohlene Lagerung

0 - 30 °C, 30 — 60 % rel. F.

Haltbarkeit

12 Monate ab dem Datum der Herstellung

Aktive Komponenten

Die getrocknete Testanschmutzung enthält Protein, Lipid und Polysaccharid. Keine der in der Zusammensetzung verwendeten Substanzen sind bekannte Karzinogene noch enthalten Sie irgendwelche Schwermetalle. Sollten Sie mit der Indikatorentinte in Berührung kommen, waschen Sie die Haut mit Seife und Wasser. Spülen Sie im Falle der Einnahme über den Mund sorgfältig aus und trinken Sie viel Wasser.

Sichere Verwendung

Der Browne STF Load Check Indikator enthält inerte Inhaltsstoffe, Farbstoffe sowie eiweißhaltige Bestandteile und Lipid. Bei ordnungsgemäßer Anwendung besteht keine Gesundheitsgefahr. Vermeiden Sie Kontakt mit Haut und Augen.
 Nicht über den Mund einnehmen. Gelangt das Material unbeabsichtigt in die Augen, spülen Sie mit Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Weder das Produkt noch die Verpackung enthalten Latex.
 Enthält keine Bestandteile von Blutprodukten.
 Enthält keine Bestandteile von Schweineprodukten

Entsorgung

Entsorgen Sie benutzte/abgelaufene Indikatoren über den normalen Abfall.

STERIS Deutschland GmbH
 Eupener Straße 70
 50933 Köln
 Tel. 0221 466 120 30
 Fax 0221 466 120 40
 Email: service@steris.com



FM26021
 ISO 13485
 MD504862