


TOSI®-FlexiCheck

Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von RDG-E's nach EN ISO 15883

NEU

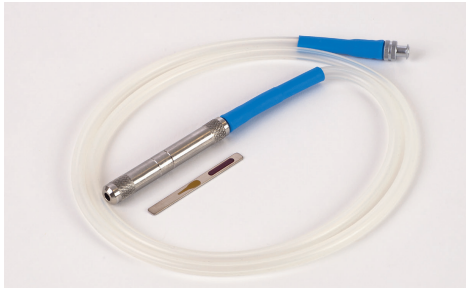

healthmark

TOSI®-FlexiCheck überprüft die Leistung der Maschine und der Reinigungsschemie. Zur Aufbereitung von Endoskopen werden Waschautomaten mit Einzelkanalanschluss empfohlen. TOSI®-FlexiCheck wird mittels Luer-Lock an dieses System angeschlossen und simuliert einen der Endoskopkanäle.

Anwendung

- Luer-Lock Anschluss zur einfachen Befestigung
- TOSI®-FlexiCheck simuliert einen Endoskopkanal
- Zwei separate Testanschmutzungen um die Ablösung von Blut und Polysacchariden zu testen
- Sofortiges Ergebnis durch visuelle Kontrolle

Auswertung

Flexible Endoskope sind meist mit Sekret, aber auch mit Blut kontaminiert. TOSI®-FlexiCheck vereint daher zwei unterschiedliche Anschmutzungen auf einem Prüfkörper: Einerseits die standardisierte Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut und andererseits eine Polysaccharidmischung.

Verunreinigte Instrumente sind ein Hygienrisiko und dürfen nicht benutzt werden. Instrumente müssen frei von jeglicher Anschmutzung sein!

Artikel-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt (Stück)
3FRIN555120	TOSI®-FlexiCheck Prüfkörper	1
3FRIN555125	TOSI®-FlexiCheck Teststreifen	25